

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal gold immunochromatography)



NEMOCNICE



TESTOVÁNÍ
SKUPIN



LETIŠTĚ



NÁDRAŽÍ



HOTEL




FIRMY




HROMADNÉ
TESTOVÁNÍ

- NEINVAZIVNÍ
- JEDNODUCHÉ POUŽITÍ
- POHODLNÉ, NENÍ VYŽADOVÁNO ŽÁDNÉ ZAŘÍZENÍ


- VÝSLEDEK DO 15 MINUT
- STABILNÍ S VYSOKOU PŘESNOSTÍ
- LEVNÉ, NÁKLAD/ ÚČINNOST

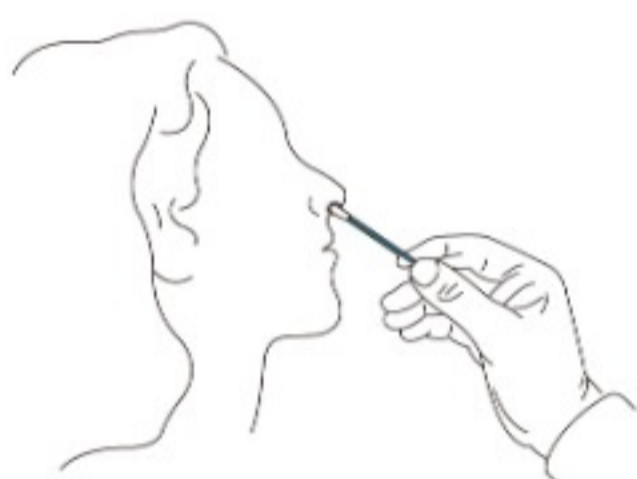

KROK 1: VYTŘETE NOSNÍ SLIZNICI
K ZÍSKÁNÍ VZORKU

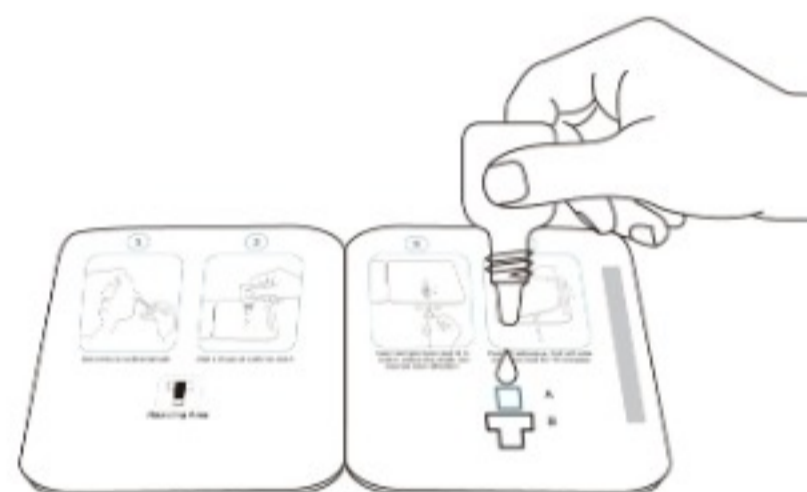


KROK 2: DEJTE 5 KAPEK DO POLE A

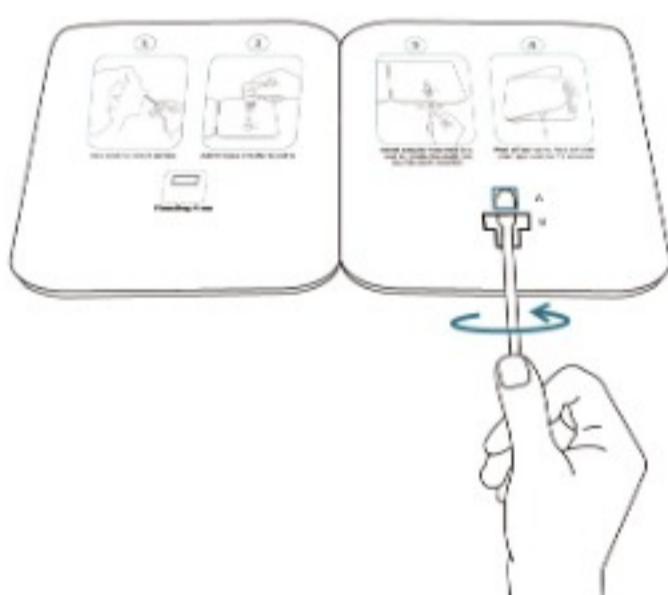

KROK 3: VLOŽTE VZOREK DO POLE B AŽ K
POLI A, OTÁČEJTE TYČINKOU VE
SMĚRU A NÁSLEDNĚ V PROTISMĚRU
HODINOVÝCH RUČÍČEK, DVAKRÁT
PO SOBĚ




KROK 4: SEJMĚTE LEPÍCÍ PÁSKU, SPOJTE
OBĚ STRANY KARTY K SOBĚ A
ČEKEJTE 15 MINUT

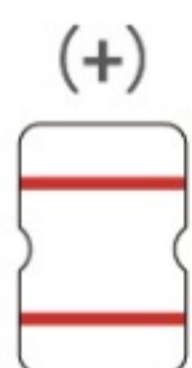

POZITIVNÍ



NEGATIVNÍ

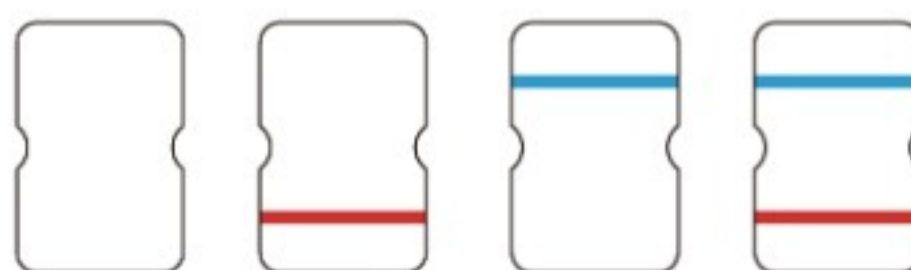

NEPLATNÝ